



XSANATEC
MEDICAL

Sondeprotectie met klevende gelstrip en met steriele gel 20 ml

EEN EFFICIËNTE EN GEBRUIKSVRIENDELIJKE BESCHERMING



Horizonlaan 36-3600 Genk

Tel: +32 (0)89 46 93 00

www.x-sanatec.com – info@x-sanatec.com

**EEN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EN VOORDELIGE OPLOSSING
VOOR DE BESCHERMING VAN STANDAARD
ECHOGRAFIESONDES.**

Geen beeldvervorming:

Dankzij de exclusieve kleefgel, sluit de beschermhoes zich perfect aan op de vorm van de sonde.

Het is voorgoed gedaan met die hinderlijke luchtbelletjes of plooiën.

Geen latex:

De beschermhoes is vervaardigd uit bijzonder sterk polyethyleen, en bevat 0% latex, waardoor het risico op allergieën wordt vermeden.

Geen echografiegel op de sonde:

Aangezien er geen gel of vervelende lijmresten op de sonde achterblijven na het verwijderen van de beschermhoes, is het gemakkelijker om deze schoon te maken en te desinfecteren.

**EEN MAXIMUM AAN ZORG DANKZIJ EEN MINIMUM AAN
RISICO'S!**

5 STAPPEN OM OP EEN VEILIGE EN BESCHERMDE MANIER EEN ECHOGRAFIE UIT TE VOEREN:

Stap 1

Verwijder de beschermhoes uit de steriele verpakking. Vouw ze open zodat het rechthoekig vlak (kleefstrip) naar boven wijst.



Stap 2

Verwijder de beschermfolie van de kleefstrip.



Stap 3

Breng het membraan van de echosonde aan op de kleefstrip. Zorg ervoor dat er geen plooiën of luchtballen gevormd worden. Indien nodig drukt u de kleeflaag goed aan op de sonde om beeldvervalsingen te vermijden.



Stap 4

Vouw de beschermhoes uit over de gehele lengte van de sonde.



Stap 5

Met behulp van de bijgeleverde kleefband bevestigt u de beschermhoes zo dicht mogelijk tegen de sonde.





Referentie	Omschrijving	Aantal/doos
11-1138EU	Polyethyleen beschermhoes met klevende gelstrip voor echografiesonde 18x28cm met steriele gelzakje	20
11-1139EU	Polyethyleen beschermhoes met klevende gelstrip voor echografiesonde 18x120cm met steriele gelzakje	20
11-1140EU	Polyethyleen beschermhoes met klevende gelstrip voor echografiesonde 18x249cm met steriele gelzakje	20

VOOR AL U VRAGEN EN INLICHTINGEN,:

Tel.: + 32 (0)89 46 93 00

Fax: + 32 (0)89 46 93 08

X-SANATEC
Horizonlaan 36
3600 GENK

www.x-sanatec.com
info@x-sanatec.com